

WEERSINK

AUTO AANPASSINGEN

PERSONENLIFT

IN EN UIT HET VOERTUIG

www.weersink.nl



www.weersink.nl



WEERSINK

AUTO AANPASSINGEN

Stappen om in de auto te komen met personenlift.

1: tilzak onder schuiven en rolstoel in positie van auto brengen.



Stap 2
Persoon tillen uit rolstoel met hefinrichting. .




Stap 3
Rolstoel opbergen.



Stap 4
Persoon draaien en met rug naar auto toe. Eerst hoofd er in.



Stap 5
Opnieuw heffen om achterwerk over de rand van de zitting te krijgen.

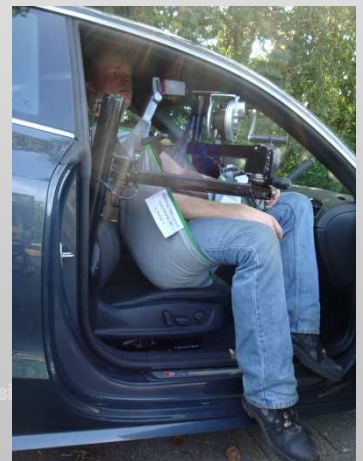

Stap 6
Laten zakken, voorzijde losmaken en opnieuw heffen. Hierdoor wordt hij achterin de stoel gezet.



Stap 7
Apparatuur losmaken en opbergen.



Stap 8
Rijden

