

# WEERSINK

## AUTO AANPASSINGEN

### PERSONENLIFT

#### IN EN UIT HET VOERTUIG

[www.weersink.nl](http://www.weersink.nl)

De personenlift is ontworpen zodat de begeleider zonder krachtsinspanning een invalide persoon in het voertuig kan tillen.

Zonder noemenswaardige krachtsinspanning is de rolstoelzittende door de begeleider in de auto te tillen. De horizontale beweging is nagenoeg wrijvingsloos in alle richtingen beweegbaar.

Eenmaal in de auto wordt de hefinstallatie benut om de man/vrouw rechtop en achterin de stoel te zetten. Dit werkt voortreffelijk.



Productinfo

# WEERSINK

## AUTO AANPASSINGEN

### Stappen om in de auto te komen met personenlift.

1: tilzak onder schuiven en rolstoel in positie van auto brengen.



Stap 2  
Persoon tillen uit rolstoel met hefinrichting. .




Stap 3  
Rolstoel opbergen.



Stap 4  
Persoon draaien en met rug naar auto toe. Eerst hoofd er in.



Stap 5  
Opnieuw heffen om achterwerk over de rand van de zitting te krijgen.

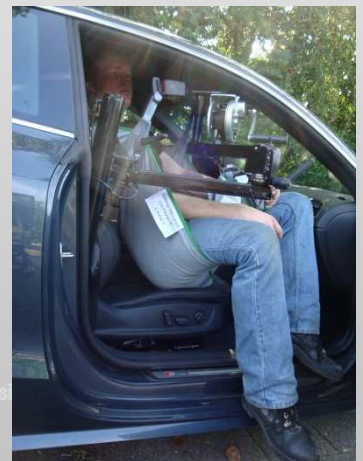

Stap 6  
Laten zakken, voorzijde losmaken en opnieuw heffen. Hierdoor wordt hij achterin de stoel gezet.



Stap 7  
Apparatuur losmaken en opbergen.



Stap 8  
Rijden

